



NOVUS™
Mascarilla nasal para CPAP



Cuidado domiciliario ▪ Mascarilla nasal para CPAP Novus



Mascarilla nasal para CPAP Novus™

La mascarilla nasal para CPAP Novus es una interface confortable y ligera para su uso en pacientes adultos (>30kg) a los que se les haya prescrito una terapia CPAP o Binivel.

Diseñada para proporcionar una solución sencilla y bien tolerada para pacientes de cuidado domiciliario, Novus tiene un número reducido de piezas, lo cual es una ventaja a la hora de ajustar la mascarilla y asegura que el proceso de ensamblaje y desmontaje sea sencillo.

Novus está disponible en dos tallas, con un suave sello de silicona, ofreciendo un ajuste confortable y efectivo, adecuado para la mayoría de usuarios.

Espaciador de la frente opcional

Proporciona opciones de ajuste adicionales para satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios

Carcasa de policarbonato de bajo perfil

Duradera, ligera y discreta

Codo con orificios de ventilación


Permite que salga el gas exhalado

Sello de silicona suave

Garantiza un sellado efectivo y un ajuste confortable

Conector giratorio de liberación rápida

Asegura una conexión y desconexión simple de la tubuladura

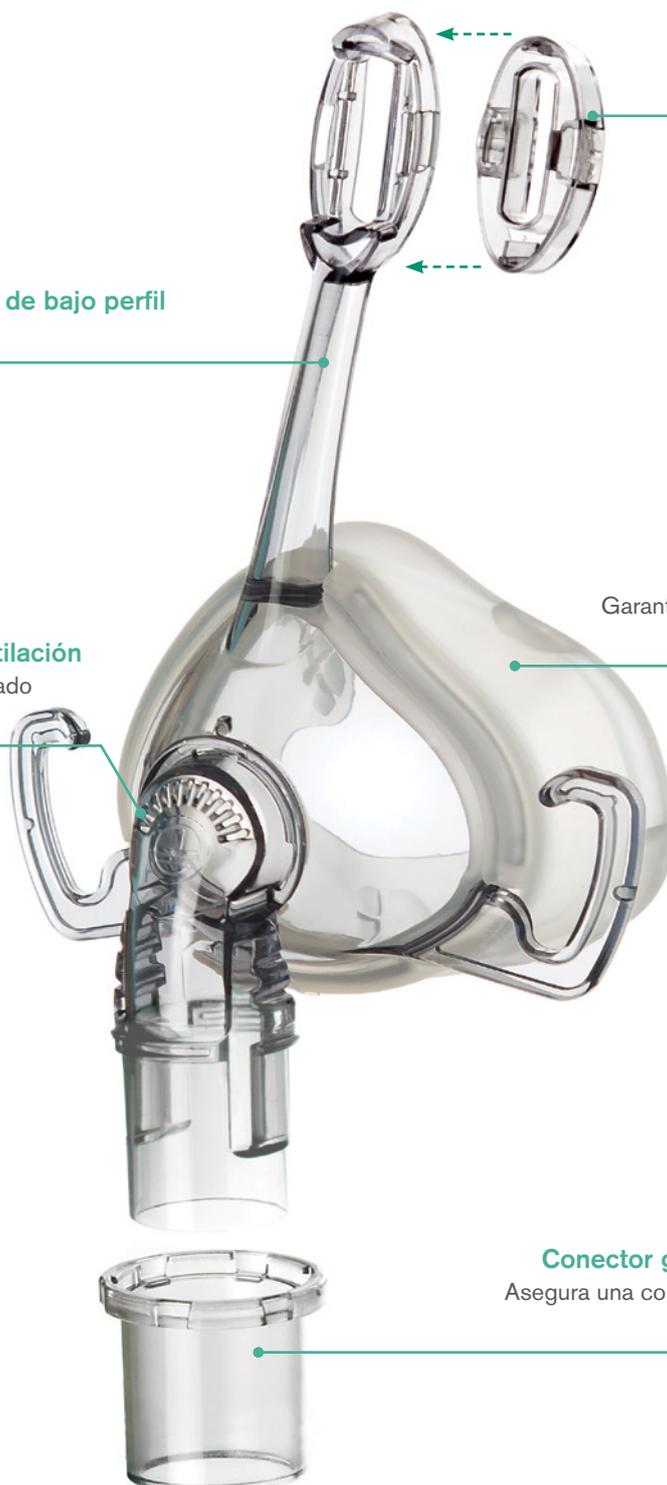




Mascarilla nasal para CPAP Novus™

Arnés transpirable
Confortable para el usuario

Pieza de liberación rápida del arnés opcional

Mejora el ajuste del arnés y puede añadirse a ambos lados de la mascarilla, para adaptarse a todos los usuarios.

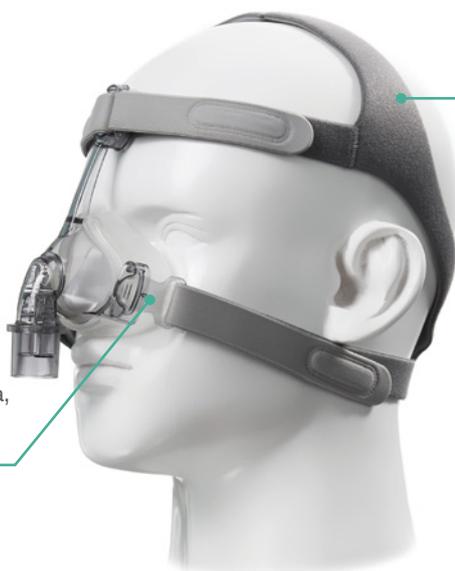

La mascarilla nasal para CPAP Novus está disponible en dos tallas: mediana y grande.

| Referencia | Descripción | Uds./caja |
|------------|---|-----------|
| 7770000 | Mascarilla nasal para CPAP Novus, Grande | 8 |
| 7790000 | Mascarilla nasal para CPAP Novus, Mediana | 8 |

Accesorios

| Referencia | Descripción | Uds./caja |
|------------|--|-----------|
| 7776000 | Arnés para mascarilla nasal para CPAP Novus (incluye el arnés y la pieza de liberación rápida) | 20 |
| 5318000 | Ramal de alma lisa de polipropileno de 22mm con conexiones flexibles, 22F-22F, longitud 1.8m | 50 |
| 5418000 | Ramal de alma lisa de polipropileno de 15mm con conexiones flexibles, 22F-22F, longitud 1.8m | 60 |



Ajuste de la mascarilla

Como obtener un ajuste cómodo y sin fugas de la mascarilla.



1. Retire el conector giratorio de la mascarilla presionando las lengüetas de liberación rápida.



2. Conecte el conector giratorio al circuito respiratorio.



3. Sujete el arnés y la mascarilla.



4. Coloque el sello de la mascarilla en la nariz y manténgala en su posición mientras estira suavemente del arnés por encima de la cabeza. Asegúrese de colocar las correas inferiores debajo de las orejas.



5. Compruebe que las correas no están retorcidas y enganche el extremo suelto de la correa inferior en el gancho de la mascarilla.



6. Ajuste la mascarilla; para ello, afloje las correas superiores, tire de ellas equitativamente y vuelva a ajustarlas al arnés. La mascarilla debe quedar en una posición fija sin estar demasiado tensa.



7. Complete el ajuste aflojando las correas inferiores y ajústelas de modo similar. La mascarilla debe quedar en una posición firme sin estar demasiado tensa.



8. Asegúrese que el dispositivo de CPAP/Binivel está en funcionamiento, debería haber flujo de aire desde la tubuladura. Conecte el conector giratorio con el circuito respiratorio al codo de la mascarilla.



9. Si fuera necesario, vuelva a ajustar las correas del arnés para evitar fugas de aire en el sello de la mascarilla. **No tense la mascarilla en exceso.** Si sigue habiendo fugas, levante de la nariz el sello de la mascarilla y vuelva a colocarla antes de ajustar nuevamente las correas del arnés.